

Jak działa Ticky?

Usuwanie kleszczy nigdy nie było tak proste

1. Sprawdź psa lub kota pod kątem kleszczy


Po każdym spacerze lub wyjściu na zewnątrz dokładnie obejrzyj swojego psa lub kota, szukając kleszczy.



2. Znajdź kleszcza

Gdy zauważysz pełzającego kleszcza w sierści swojego pupila, weź Ticky do ręki, zdejmij nasadkę ochronną i otwórz urządzenie.

Umieść kciuk i palec wskazujący w specjalnie wyprofilowanych zagłębieniach górnej i dolnej części urządzenia.

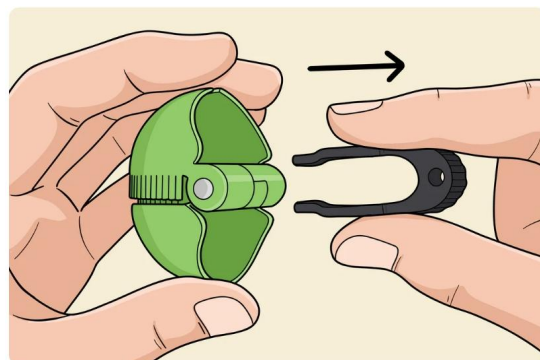

3. Chwyć kleszcza

Ticky działa jak szczęki z drobnymi ząbkami.

Umieść szczęki urządzenia nad kleszczem i...




4. Usunąć kleszcza

...ściśnij urządzenie na tyle, aby przednie ząbki lekko zachodziły na siebie – szczęki są teraz zamknięte.

👉 **Ważne:** Nie ściskaj zbyt mocno, aby nie przytrzasnąć sierści zwierzęcia.

Delikatnie odciągnij zamknięty Ticky od sierści. Włosy swobodnie przechodzą między ząbkami, natomiast kleszcz zostaje bezpiecznie uwięziony wewnątrz urządzenia.

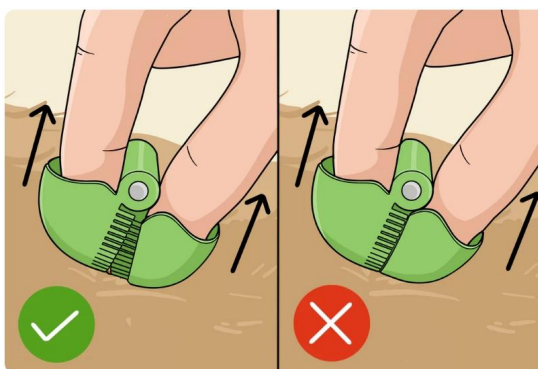


5. Zabij kleszcza

Teraz ściśnij Ticky nieco mocniej.

Wewnętrzne powierzchnie szczęk zetkną się ze sobą i skutecznie zmiażdżą kleszcza – higienicznie i bez bezpośredniego kontaktu ze skórą.

Jeżeli kleszcz znajduje się pomiędzy przednimi ząbkami, zazębnią się one ze sobą i równie skutecznie zmiażdżą pasożyta.

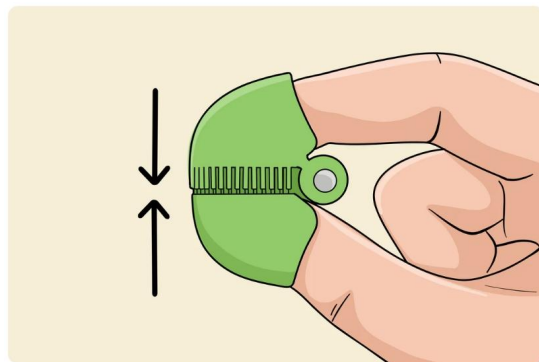

6. Czyszczenie

Usuń martwego kleszcza za pomocą chusteczki lub starej szczoteczki do zębów. Następnie umyj Ticky wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z wydzielinami kleszcza, ponieważ mogą one zawierać niebezpieczne patogeny.



Użyj Ticky jako haczyk do usuwania wbitych kleszczy

Jeżeli kleszcz zdążył już wbić się w skórę Twojego pupila, Ticky oferuje drugie rozwiązanie. W górnej i dolnej części urządzenia znajdują się wycięcia w dwóch różnych rozmiarach, które działają jak klasyczny haczyk do usuwania kleszczy.


1. Przyłóż Ticky

Ostrożnie umieść haczyk przy skórze zwierzęcia i ustaw go tak, aby kleszcz znalazł się pomiędzy skórą a wycięciem haczyka.



2. Umieść kleszcza w wycięciu

Powoli wsuń kleszcza w szczelinę haczyka, aż zostanie pewnie uchwycony jak najbliżej skóry, bez ściskania jego ciała.

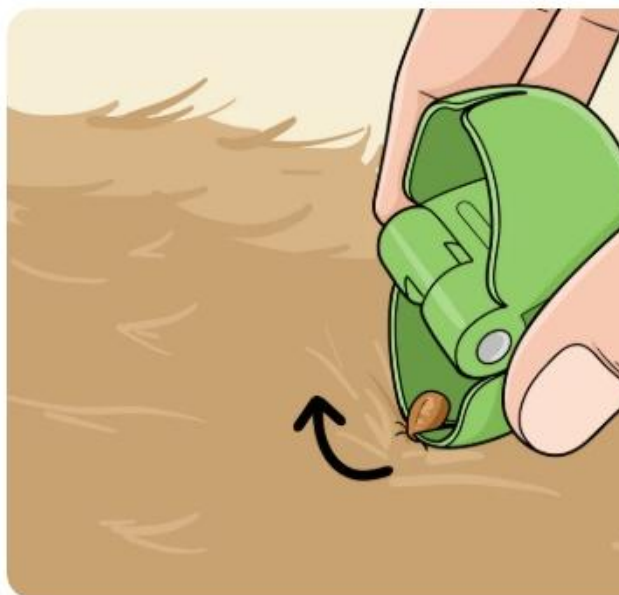

3. Usuń kleszcza


Delikatnie i równomiernie unieś haczyk lub pociągnij go do góry, aż kleszcz całkowicie się odcepi.

Nie ma potrzeby szarpania ani wykręcania kleszcza.




4. Usuń kleszcza z Ticky

Ostrożnie zdejmij usuniętego kleszcza z urządzenia przy pomocy chusteczki.

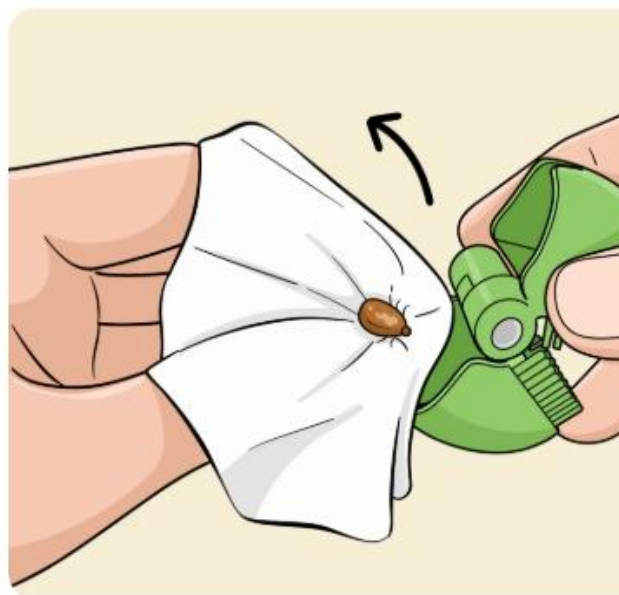

5. Zabij kleszcza

Pozostaw kleszcza wewnątrz złożonej chusteczki i zgnieć go, dociskając zewnętrzną częścią Ticky (nasadką ochronną).

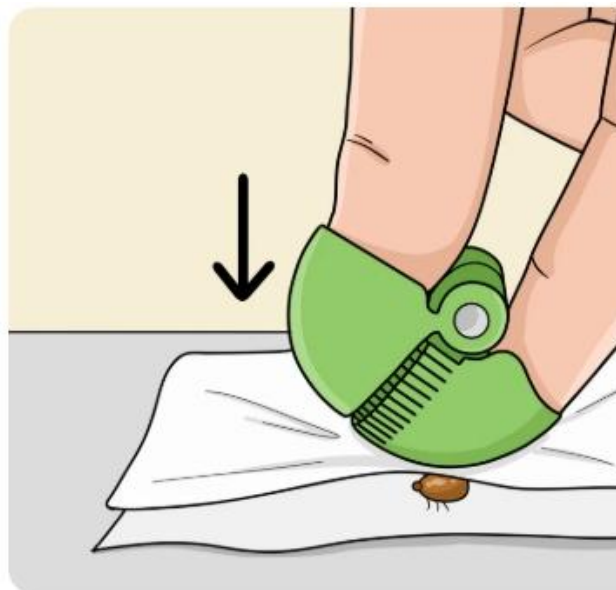

6. Zdezynfekuj miejsce ukąszenia i wyczyść Ticky

Zdezynfekuj miejsce po ukąszeniu. Następnie dokładnie umyj Ticky wodą z niewielką ilością mydła lub płynu do mycia naczyń.



Dzięki ochronnym nasadkom Twoje palce są skutecznie zabezpieczone przed kontaktem z wydzielinami kleszcza.

⚠ Ważne: Nie miażdż wbitych (opitych krwią) kleszczy szczękami Ticky. Takie kleszcze są zwykle mocno wypełnione płynami ustrojowymi, a podczas zgniatania ich zawartość może zostać rozpryskana.